

Instrukcja pobierania materiału do badania. Instructions for taking material for testing.

doktor **PrEP,pl**

- 1.** Umyj ręce.
Wash your hands.


- 2.** Wyjmij zestaw do pobrania śliny. Nakrętkę odłóż na bok. Przez ustnik napluj do środka plastikowego pojemnika na ok. 1 cm wysokości.

Take out the saliva collection kit. Set the cap aside. Through the mouthpiece, spit into the plastic container to a height of approximately 1 cm.



- 3.** Odkręć ustnik. Zakręć pojemnik odłożoną na bok nakrętką.

Unscrew the mouthpiece. Close the container once set aside to the side with a nut.

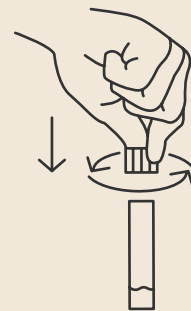

- 4.** Umyj ręce.
Wash your hands.

- 5.** Włóż tubkę zwrotną do pudełka transportowego, w którym otrzymałeś/otrzymałaś zestaw. Pozostaw załączone skierowanie w środku pudełka.

Put the return tube in the same shipping box in which you received the kit. Leave the enclosed referral inside the box.

- 6.** Wygeneruj list przewozowy skanując kod QR znajdujący się wewnątrz pudełka transportowego i umieść foliopak w paczkomacie.

Generate a shipping list by scanning the QR code inside the shipping box and place the courier bag in the parcel locker.

Proste? Proste. Nikt nie mówił, że będzie trudne.
Easy? easy. Nobody said it would be difficult.

doktor **PrEP,pl**